


DES INSURANCE

INSTRUMENTAARIUMI DESINFITSEERIV PESEMISVAHEND

DES INSURANCE on efektiivne puhastus- ja desinfektsioonivahend meditsiiniinstrumentide kuum- või keemilise sterilisatsioonieelseks pesemiseks ja desinfitseerimiseks.

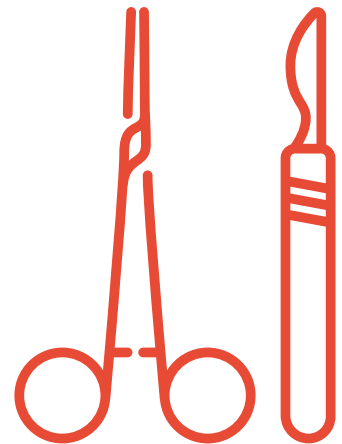

Sobib kõikide veepesu taluvate instrumentide pesemiseks. Toode on materjalisõbralik. Eemaldab meditsiinilistelt instrumentidelt vere, valgud, sekreedid ja rasvad. Loputamisel eemaldub materjalidelt kiiresti ja täielikult.

DES INSURANCE on laia antimikroobse toimega, hävitab Gram-positiivseid ja Gram-negatiivseid baktereid, seeni, viiruseid (sealhulgas HBV, HIV).

Ei sisalda fosfaate.

Töölahuse kasutamine on ruumis viibivatele inimestele kahjutu.

KASUTAMINE :

Kohe peale kasutamist asetada lahtivõetud instrumendid kaanega suletavasse DES INSURANCE 1% (10 ml kontsentrati lisada 990 ml vee hulka) töölahusega täidetud vanni 10 minutiks. Jälgida, et kogu pestav instrumentarium oleks lahusega kaetud. Toimeaja möödudes instrumendid pesta ja loputada jooksva veega ning vajadusel steriliseerida.

Kasutamisel masinpesuseadmetes soovitatav lisada vahu regulaatorit.

Keemilise sterilisatsiooni vahendina sobib kasutamiseks Chemihyd Des.

Töölahused valmistada kontsentrati lahustamisel vees. Valmis töölahus säilib suletult 14 ööpäeva, kasutusel olev lahus 1 ööpäeva.

Toodet säilitada tihedalt suletud korgiga anumates, temperatuuril +5 - + 30°C.

ETTEVAATUSABINÕUD:

Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja vajadusel pöörduda arsti poole.

Allaneelamisel anda rohkesti juua, vajadusel konsulteerida arstiga.

KOOSTIS:

mitteionogeenne tensiid, kvaternaarsed ammooniumühendid, naatriumkarbonaat, kompleksimoodustaja, lõhnaaine


pH 11 (kontsentraadil), kasutuslahuse 9,0 -10,0

Toode vastab EN 1040, EN 1275, EN 13727, EN 13624 nõuetele.


Omab CE märgistust vastavalt Meditsiiniseadmete Direktiivile
Registreeritud Ravimiameti meditsiiniseadmete osakonnas



PAKENDID:

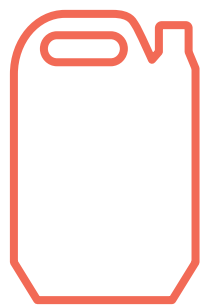

5000ml kanister

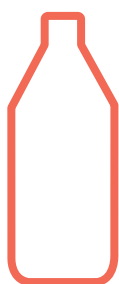

1000ml plastpudel



AS Chemi-Pharm
Tänassilma tee 11, Saku vald, 76406, Eesti
www.chemi-pharm.com
chemi-pharm@chemi-pharm.com