


STERISEPT

Ready to Use

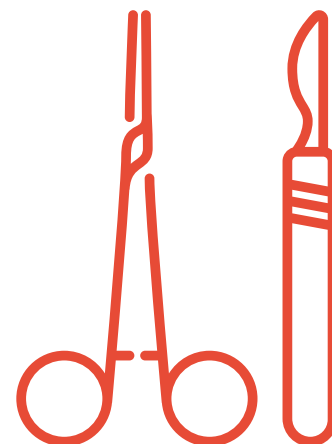

ALKOHOLIVABA MEDITSIINISEADMETE KIIRDESINFEKTSIOONI- JA PUHASTUSVAHEND

Sterisept Ready to Use on alkoholivaba kiirdesinfektsiooni- ja puhastusvahend invasiivsete ja mitteinvasiivsete meditsiiniseadmete ning alkoholile tundlike pindade desinfektsiooniks ja puhastamiseks. Toode ei sisalda alkohole, aldehüüde ega biguaniide (PHMB) ning sobib tervishoiuasutustes kõikide veepesu taluvate pindade puhastamiseks. Tänu spetsiaalsele koostisele omab toode häid desinfitseerivaid ja ka puhastavaid omadusi.

Sterisept Ready to Use on laia bakteritsiidse (sh. MRSA, VRE), mükobakteritsiidse (sh. Mycobacterium avium ja Mycobacterium terrae), fungitsiidse ja pärmseentevastase toimega, samuti omab toimet viirustesse (sh. HBV, HIV, HCV, Vaccinia, Rota, Noro) ja spooridesse (sh. Clostridium difficile).

Sterisept Ready to Use on sobiv ka kontamineerunud meditsiiniinstrumentide leotamiseks ja eeldesinfektsiooniks. Kirurgiliste instrumentide steriliseerimiseelne töötlemine on oluline samm tõhusa ja ohutu steriliseerimisprotseduuri tagamiseks. Protseduur vähendab mikroobset saastumist ning eemaldab instrumentidelt vere, koed ja muud orgaanilised jäägid.

Sterisept Ready to Use sobib kasutamiseks järgmiste pindade ja instrumentide töötlemiseks: roostevaba teras, klaas, alumiinium, vask, messing, keraamika, PVC, kumm, plastik, silikoon, nahkpinnad ning akrüül- ja pleksiklaas.

KASUTUSKOHAD:

Sterisept Ready to Use'i kasutatakse haiglates ja teistes tervishoiuasutustes, operatsioonitubades, intensiivravi palatites, nakkus- ja vastuvõtuosakondades, perearstikeskustes, polikliinikutes, kiirabijamades, haigete transpordivahendites, laboratooriumites.

- Mitteinvasiivsete, alkoholi mittetaluvate meditsiiniseadmete puhastamiseks ja desinfitseerimiseks
- Patsiendi ja kliendiga seotud pinnad, nagu voodiraamid ja madratsid
- Läbivaatuse instrumendid
- Opeartsioonisaali pinnad
- Kuvöösid, vannid ja protseduurikärud
- Klaviatuurid ja aparaatide ekraanid ning korpused
- Samuti on toode sobilik kasutamiseks hambaravi- ja veterinaarkliinikutes ning ilu- ja terviseteenuseid pakkuvates ettevõtetes.

KASUTAMINE:

Sterisept Ready to Use on kasutusvalmis toode. Kanda pinnale nii, et kogu pind oleks desinfektsioonivahendiga ühtlaselt kaetud. Toimeaeg minimaalselt 60 sekundit või vastavalt efektiivsusele erinevate mikroobide suhtes (vt. Tabel). Toodet saab pinnale kanda kas pihustades või pühkides immutatud rätikuga.

Pihustamist soovitatakse vaid raskesti ligipääsetavate kohtade töötlemiseks. Pihustatakse ca 30cm kauguselt pinnale ja seejärel kantakse lapiga ühtlaselt pinnale.

Pühkimisel lapiga niisutatakse eelnevalt kiudkangas piisava koguse tootega ja pühitakse pind.

Pindadelt ja instrumentidelt, mis töötlemisjärgselt puutuvad kokku inimese või toiduga, tuleb peale toimeaja möödumist eemaldada niiske lapiga desinfektsioonivahendi jäägid.

Sterilisatsioonieelne kirurgiliste instrumentide töötlus: kontamineerumise ja orgaaniliste jääkide kuivamise vältimiseks pihustada vastavasse anumasse kogutud kasutatud instrumendid üle Sterisept Ready to Use'ga viisil, et kõik instrumendid oleksid korrektselt niisutatud. Seejärel jätkata steriliseerimisprotsessiga vastavalt instrumenditootja juhenditele.

MIKROBIOLOOGIA

MIKROORGANISM	TESTI MEETOD	TOIMEAEG
Bakterid (sh. MRSA, VRE)	EN13727, EN14561, EN13697	1 minut
Pärmseened	EN13624, EN13697	1 minut
Kõik ümbrisega viirused	EN14476	30 sekundit
Rotaviirus, Noroviirus	EN14476	30 sekundit
Mükobakter	EN14348	5 minutit
Hallitusseened (Aspergillus brasiliensis)	EN13624	10 minutit
Spoorid (Clostridium difficile)	EN13704	15 minutit

ETTEVAATUSABINÕUD:

Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Vältida sattumist keskkonda. Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt ohtlike jäätmete või vastavate pakendite või pakendijäätmete eeskirjadele.

KOOSTIS:

100 g toodet sisaldab toimeaineid: Didecyl-Dimethyl-Ammonium Chloride (DDAC) 0,45g ; N-(3-amino-propyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine 0,45g

Toode vastab EN13727, EN14561, EN13697, EN13624, EN14476, EN14348, EN13704 nõuetele.

Omab CE märgistust vastavalt Meditsiiniseadmete Direktiivile
Registreeritud Ravimiameti meditsiiniseadmete osakonnas



PAKENDID:



5000ml kanister



1000ml pihustipudel



AS Chemi-Pharm
Tänassilma tee 11, Saku vald 76406, Eesti
www.chemi-pharm.com
chemi-pharm@chemi-pharm.com