


CHEMIDES PULVER

MEDITSIINISEADMETE KÕRGASTME DESINFEKTSIOONI JA KEEMILISE STERILISATSIOONI VAHEND

CHEMIDES PULVER on sporitsiidse toimega hügrokoopne pulber, mis lahustub täielikult vees. Lahustumisel vabaneb pulbrist aktiivne hapnik ning koos aktivaatoriga moodustub lisaks peräädikhape, mille tõttu on tootel väga tugevad desinfitseerivad (sporitsiidsed) omadused Pulber on keskkonnale ohutu, kunatoimeained lagunevad veeks ja hapnikuks.

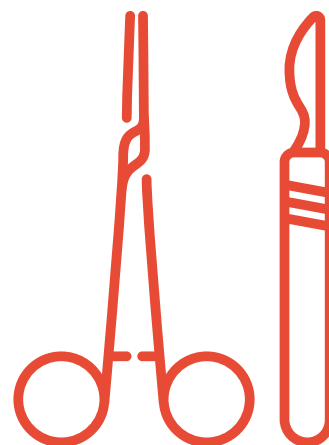

CHEMIDES PULVER toimib gramnegatiivsetesse ja grampositiivsetesse bakteritesse, tuberkuloositekitajasse, seentesse, viirustesse (sh HBV, HIV, rota- ja adeno) ning spooridesse;

CHEMIDES PULVER on ette nähtud meditsiiniseadmete ja pindade puhastamiseks ja desinfektsiooniks ning korduvkasutatavate meditsiiniseadmete, hambaraviseadmete, haiglates ja tervishoiuasutustes kasutatavate meditsiiniinstrumentide (endoskoobid, bronhoskoobid, laparoskoobid, intubatsioonitorud ja anesteesiavarustus) kõrgastme desinfektsiooniks ja keemiliseks sterilisatsiooniks.

Aktiveeritud **CHEMIDES PULVER**-i lahus on selge ja läbipaistev, võimaldades puhastatavate instrumentide jälgimist nende töötlemisel. Aktiveerumiseks lastakse lahusel seista 15 minutit. Vahend ei muuda pindade visuaalset väljanägemist. Pinnad ei vaja loputamist.

CHEMIDES PULVER sobib kõigi peamiste meditsiiniseadmete materjalidega, mida kasutatakse haiglates ja tervishoiuasutustes. Ei sobi kasutamiseks vask, tina, pronks, messing ja alumiiniumpindadel.

Valmislahust tuleb vahetada iga kaheksa tunni möödudes või lahuse värvuse/läbipaistvuse muutumisel koheselt. Valmislahuse toime/aktiivuse hindamiseks võib kasutada peräädikhappe testribasid (aktsepteerimiskriteerium → 1000 ppm peräädikhapet pärast 8 tunni möödumist).

DOSEERIMINE:

CHEMIDES PULVER-i töölahuse valmistamiseks lahustatakse pulber vees.

Ühe liitri lahuse valmistamiseks lisatakse veele 17,5 grammi pulbrit (üks mõõtlusikatäis või 1 pakk ühes liitris kraanivees).

KASUTAMINE:

Instrumentide, seadmete ja pindade puhastamine ning desinfektsioon

1. Lisa 17,5g CHEMIDES PULVER-it iga leige (30-35°C) kraanivee liitri kohta
 2. Sega lahust 15 min pulbri lahustamiseks ja valmislahuse efektiivsuse saavutamiseks
 3. Enne kasutamist veendu, et lahus on selge ja läbipaistev ja kogu pulber on lahustunud
 4. Kata pinnad lahusega või aseta instrumendid lahusesse
 5. Töötle pinnad töölahusega kasutades pühkimis-, pihustamis- või märgpesumeetodit
 6. Lahuse toimeaeg 15 minutit
 7. Toimeaja möödudes loputada instrumendid vastavalt vajadusele jooksva veega või steriilse veega. Pinnad ei vaja loputamist.
 8. Vaheta valmislahust vastavalt saastumisele korra päevas või pärast igat töötsükli
- Jälgida seadme tootja juhiseid desinfektandi kasutamisel
-

MIKROBIOLOOGIA

MIKROORGANISM	KONTSENTRATSIOON	TOIMEAEG
Bakterid EN 13737:2012+A1:2013; EN 14561		
Pseudomonas aeruginosa	1%	1 min
Staphylococcus aureus	1%	1 min
Enterococcus hirae	1 %	1 min
Pärmid, Seened EN 13624; EN 14562		
Candida albicans	1,5%	1 min
Asperigillus brasiliensis	1,75%	15 min
Asperigillus niger	1,5%	15 min
Tuberkuloos EN 14348; EN14563		
Mycobacterium avium	1,5%	10 min
Mycobacterium terrae	1,5%	15 min
Bakterite spoorid EN 13704		
Clostridium difficile	1,5%	10 min
Bacillus subtilis	1,75%	15 min
Ümbrisega viirused		
HBV, HIV, HCV	0,5%	5 min
	0,1%	30 min
Ümbriseta viirused EN 14476		
Polioviirus	1,75%	15 min
	1%	30 min
Adeno	0,5%	5 min
	0,1%	30 min
Noroviirus	0,5%	5 min

Instrumentide keemiline sterilisatsioon

1. Puhasta instrumendid või meditsiinitarvikud
2. Lisa 17,5g CHEMIDES PULVER-it iga leige (30-35 °C) kraanivee liitri kohta
3. Sega lahust kuni enamuse pulbrist on lahustunud (2-3 minutit)
4. Jäta saadud lahus seisma 30 minutiks, saavutamaks valmislahuse efektiivsust
5. Pane eelnevalt puhastatud instrumendid lahusesse 15 minutiks
6. Loputa steriilse veega
7. Vaheta valmislahust vastavalt saastumisele korra päevas või pärast igat töotsükli
8. Vältida desinfitseeritud instrumentide määrdumist peale lahusest väljavõtmist. Desinfektsioonivahendi kasutamisel järgida tootjapoolseid ettekirjutusi.

ETTEVAATUSABINÕUD:

Allaneelamisel kahjulik. Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.

Hoida toodet originaal pakendis kuivas ja jahedas kohas. Sulge pakend peale kasutamist.

ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGIKUSTEABEKESKUSE või arstiga.

SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

Kõrvaldada sisu/mahutid kooskõlas kehtivate jäätmekäitlusseadustega.

KOOSTIS:

100g CHEMIDES PULVER-it sisaldab:

Naatrium perkarbonaati 41g; Tetra-atsetüületüleen diamiini (aktivaator) 25g; Orgaanilisi happeid, stabilisaatorit, mitteionogeenseid tensiidide (biolagunevus →90%), korrosiooni inhibiitorit jt.


Omab CE märgistust vastavalt meditsiiniseadmete direktiivile
Registreeritud Terviseameti meditsiiniseadmete osakonnas




PAKENDID:



17,5 g pakend

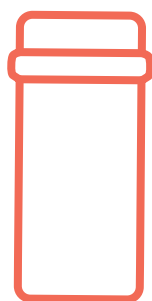

1 kg purk koos
doseerimislusikaga

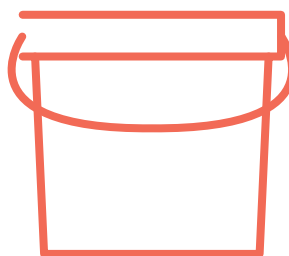

5kg ämber



10kg ämber



AS Chemi-Pharm
Tänassilma tee 11, Saku vald, 76406, Eesti
www.chemi-pharm.com
chemi-pharm@chemi-pharm.com